

Használati utasítás az ACUAISS nedvesítő szemcsepphez



- Az ACUAISS szemcsepp a kontaktlencse komfortosabb viseletének segítésére készült.
- Használja az ACUAISS cseppet, ha száraznak érzi a szemét, ill. ha a lencsét hosszan viseli.
- Felbontás után 60 napig használható. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Összetétel: Hydroxyethylcellulose, disodium edatate 0,02%, sodium chloride, boric acid, és polyhexanide 0,0001%.

Használata:

1. Használat előtt mindig mosson kezet.
2. Cseppentsen 1-2 cseppet a szemébe, majd tartsa a szemét rövid ideig csukva.
3. A kicsorduló folyadékot törölje le az arcáról.
4. **SOHA NE ÉRINTSE A CSEPPENTŐ VÉGÉT, ill. AZ SOHA NE ÉRJEN A SZEMÉHEZ.**
5. Használaton kívül, mindig tartsa jól lezárva a flakont.
6. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Gyártó: DISOP ALCOBENDAS (Valdelaparra 31-A, Madrid, Spanyolország) CE0318

Forgalmazza: Intercont-Optika Kft, (1576. Bp. Pf 48.) [www. Intercont-optika.hu](http://www.Intercont-optika.hu)