

## MAGYAR

A **DURASOL ÁPOLÓSZER** gázáteresztő és kemény (PMMA) kontaktlencsék ápolására készült oldat, a lencsét a tokban történő tárolás közben fertőtleníti. Nagy nedvesítőképessége meghosszabbítja a lencsék élettartamát és megkönnyíti felhelyezésüket.

### HASZNÁLATA

1. Mossa meg alaposan a kezét.
2. Amint a lencsét Durasol Limpiador tisztítóval megtisztította, helyezze őket a tokjukba, merítse bele a Durasol Conservador ápolószerbe, és hagyja ott másnapig, de legalább hat órán keresztül.
3. Amikor a kontaktlencsétet újból használni kívánja, vegye ki őket a tokjukból, és helyezze fel őket máris a szemére.
4. Amennyiben használat közben a lencsétet le kell vennie, cseppentsen néhány csepp Durasol Conservador ápolószert a lencsére, mielőtt újból felhelyezné őket.

### ELŐVIGYÁZATOSSÁGI SZABÁLYOK

- A palackot használaton kívül jól lezárva tartsa.
- A lencsék tokját naponta töltsse fel friss Durasol Conservador ápolószerrel.
- Felnyitás után 90 napon belül használja fel.
- Gyermekek elől elzárva tartsa.

### ÖSSZETÉTEL

Hidroxi-propil-metil-cellulóz, poloxamer, 0,1%-os dinátrium-edetát és 0,0004%-os polihexametilén-biguanid, polimer izotónikus és tamponált hordozóanyagban.

A **DURASOL LENCSETISZÍTÓ** gázáteresztő és kemény (PMMA) kontaktlencsék napi tisztítására készült. Tisztító hatását egy szilárd szuszpenzió biztosítja, amely a használat közben a lencsére rakódott minden szennyeződést eltávolít.

### HASZNÁLATA

1. Alaposan mosson kezet.
2. Használat előtt jól rázza fel a palackot.
3. Helyezze a lencsét a tenyerére, majd öntsön rá néhány cseppet a Durasol Limpiador tisztítószereből. Finoman dörzsölje az ujj hegyével 10 - 20 másodpercig.
4. Durasol Conservador ápolószerrel öblítse le a lencséről a Durasol Limpiador tisztítószert maradvékát.
5. A lencsétet tokjukban a Durasol Conservador ápolószerbe merítve tárolja másnapig, de legalább hat órán keresztül.

### ELŐVIGYÁZATOSSÁGI SZABÁLYOK

- Ezt a terméket lágy kontaktlencsékhez ne használja.
- ÜGYELJEN ARRÁ, HOGY A TERMÉK A SZEMÉBE NE JUSSON. Irritációt okozhat.
- A palackot jól lezárva és gyermekek elől jól elzárva tárolja.
- Felnyitás után 90 napon belül használja fel.

### ÖSSZETÉTEL

Nátrium-lauriléter-szulfát, szilikagél mint szilárd tisztítószert szuszpenzióban, 0,1%-os dinátrium-edetát, 0,001%-os polihexametilén-biguanid polimer izotónikus és tamponált hordozóanyagban.

MANUFACTURER  
DISOP  
WALDEARRASTA  
ALCOBENDAS  
MADRID



STERILE A

CE 0318

33201-0

# DURASOL

## AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

CONSERVATEUR

CONDITIONER

CONSERVANTE

ÁPOLÓSZER

REINIGER

NETTOYANT

CLEANER

DETERGENTE

LENCSETISZÍTÓ



DISOP