

MAGYAR

DURASOL UNIVERZÁLIS KONTAKTLENCSE-ÁPOLÓ FOLYADÉK KEMÉNY ÉS GÁZÁTERESZTŐ (RGP) KONTAKTLENCSEKHEZ

A DURASOL univerzális kontaktlencse-ápoló folyadék a kemény és gázáteresztő lenszék összes típusának tisztítására, fertőtlenítésére és öblítésére alkalmas.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Mosson kezet, mielőtt a lencsékhez érne.
2. Vegye ki az egyik kontaktlencsét, és helyezze el a tenyerében. Csepegtessen rá DURASOL univerzális kontaktlencse-ápoló folyadékot, és mutatóujja segítségével finoman dörzsölje meg mindkét oldalát húsz (20) másodpercig.
3. A megtisztított lencsét helyezze be az üres tartóba, majd a tartót töltsze fel friss DURASOL univerzális kontaktlencse-ápoló folyadékkal, hogy teljesen belepje a lencsét.
4. Mindezt ismétlje meg a másik kontaktlencse esetében is.
5. A megfelelő fertőtlenítés érdekében a kontaktlencsétartsa egész éjszaka, de legalább hat (6) órán át az ápolófolyadékkal megtöltött, zárt tartóban.
6. A kontaktlencsét behelyezés előtt öblítse át öt (5) másodpercig, hogy felületüket teljesen megtisztítsa az esetleges rátapadt szennyeződésekől. Ezután behelyezheti őket.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A folyadék egyszeri használatra készült. Naponta cserélje a DURASOL ápolófolyadékot a lencsetartóban.
2. Ha a terméket nem használja, jól zárja le a tetejét, és ne engedje, hogy cseppentője bármilyen felülettel érintkezzen.
3. Ne használja a terméket, ha bármelyik összetevőjére allergiás.
4. Ha a termék használata folyamatos irritációt vált ki, vegye ki a kontaktlencsét, és forduljon szemorvoshoz.
5. Az ápolófolyadékot szobahőmérsékleten tartsa.
6. A lencsetartókat rendszeresen tisztítsa, és hagyja a levegőn megszáradni.
7. A terméket tartsa gyermekektől távol.

ÖSSZETÉTEL

Steril és pufferelt fiziológiás sóoldat, mely hidroxipropil-metil-cellulózt, poloxamert, bórsavat, nátrium-borátot, nátrium-kloridot tartalmaz dinátrium-edetát 0,1%-os és polihexametilén-biguanid 0,0004%-os tartósítósóldatában.

MANUFACTURER
D I S O P
VALDEAPARRA 31-A
ALCOBENDAS
M A D R I D



STERILE A

CE 0318

37820-1

DURASOL

**SOLUCIÓN ÚNICA
PARA LENTES DE CONTACTO RGP**

**SOLUÇÃO ÚNICA
PARA LENTES DE CONTACTO RGP**


**ALL-IN-ONE-LÖSUNG
FÜR RGP KONTAKTLINSEN**

**SOLUTION UNIQUE
POUR LENTILLES RGP**

**MULTIPURPOSE SOLUTION
FOR RGP LENSES**

**SOLUZIONE UNICA
PER LENTI RGP**

**UNIVERZÁLIS
KONTAKTLENCSE-ÁPOLÓ
RGP KONTAKTLENCSEKHEZ**

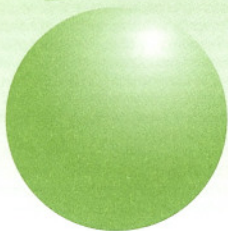

 **DISOP**