

Használati utasítás a **NACLENS** nedvesítő szemcsepphez



- A Naclens szemcsepp a kontaktlencse komfortosabb viseletének segítésére készült.
- Használja a Naclens cseppet, ha száraznak érzi a szemét, ill. ha a lencsét hosszán viseli.
- Felbontás után 60 napig használható. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Összetétel: 0.1% Hydroxyethylcellulose, 0.1%polyvinylpyrrolidone, 0.1% disodium edatate, és 0.00001% polyhexamethylene biguanide isotóniás és bufferolt sóoldatban.

Használata:

1. Használat előtt mindig mosson kezét.
2. Cseppentsen 1-2 cseppet a szemébe, majd tartsa a szemét rövid ideig csukva.
3. A kicsorduló folyadékot törölje le az arcáról.
4. **SOHA NE ÉRINTSE A CSEPPENTŐ VÉGÉT, ill. AZ SOHA NE ÉRJEN A SZEMÉHEZ.**
5. Használaton kívül, mindig tartsa jól lezárva a flakont.
6. Gyermekek elől elzárva tartandó!

Gyártó: DISOP ALCOBENDAS (Valdelaparra 31-A, Madrid, Spanyolország) CE0318

Forgalmazza: Intercont-Optika Kft, (1576. Bp. Pf 48.) www.intercont-optika.hu